

## Instruktion för transport av blodprov-som tas i hemsjukvården

För att säkerställa god kvalitet på blodprovet i provröret samt uppfylla krav för transport av biologiskt material kategori B, måste transport ske på rätt sätt.

Transport av blodprov som tas av hemsjukvården och ska till vårdcentral för vidare transport till sjukhusens laboratorier ska ske enligt följande:

- Transportera proven i en speciell burk avsedd för detta ändamål.
  - Transportburken innehåller en stötdämpande skumplasten med hål för 12 provrör.
  - I transportburkens botten ska det alltid finnas ett absorberande material. Går rören sönder ska provmängden sugas upp av detta.
- Ställ provrören lodrätt i skumplastens hål.
- Förslut transportburken ordentligt.
- Sätt ner burken i en sluten ytterförpackningen, märkt med UN 3373 och Biological Substance Category B enligt ADR/ADS-S.
- Förvara proven i eller strax under rumstemperatur vid transport till vårdcentralen. Detta kan innebära att transportasken måste tas med in från bilen vid hembesök.
  - Förvara aldrig blod i minusgrader eller varmare än ca 30°C – vid felaktig förvaring kan det t ex bli hemolys (blodkropparna går sönder) i blodprovet.
- Provrören ska under hela transporten stå i transportburken och plockas inte ur förrän på vårdcentralen.

Förorenad transportburk rengörs med vatten (för att lösa blodrester) och därefter ytdesinfektion.

Förorenad skumplast och absorberande material byts ut.

Transportburkar, skumplast och absorberande material är läkemedelsnära produkter, men kan inte beställas inom systemet. Kontakta upphandlingsavdelningen Landstinget Kronoberg, beställningsservice, i första hand via mail [viktorija.jonsson@ltkronoberg.se](mailto:viktorija.jonsson@ltkronoberg.se), i andra hand via telefon 0470-58 62 97.

Även klisterlapp för UN-märkning av ytterförpackning kan beställas via Viktoria.



Katarina Skov-Poulsen

Karin Svensson

Klin kem lab, Landstinget Kronoberg

För Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i länet