

## **Egenkontroll av diskdesinfektor**

### Daglig kontroll

- Att spolarmen/-armarna snurrar fritt.

### Veckokontroll

- Kontroll och rengöring av bottensilen. Lyft av silen, rengör den och rengör även utrymmet under silen.
- Ta loss spolarmen/-armarna och rengör. Spolas rent under rinnande vatten. Kontrollera att vattnen passerar genom hålen.
- Markera nivån för diskmedel, skriv datum och signatur.

### Signeringslista

Signera utfört arbete!

### Årlig kontroll

- Service och underhåll. T ex. Temp, tryck, byte av packningar m.m.